
Unique nouveau design pour l'homme quatre couches de poussière d'allergie grippe oreille masque souffle sain de sécurité respirateur de ski chaud vélo à moitié visage masques filtres poussière pollen allergènes grippe germes masques



### **Caractéristiques:**

Conception 3D stéréo de fuselage humain d'ingénierie Tissu non tissé multicouche et meltblown, total 4 couches Forme de maintien de ceinture en aluminium

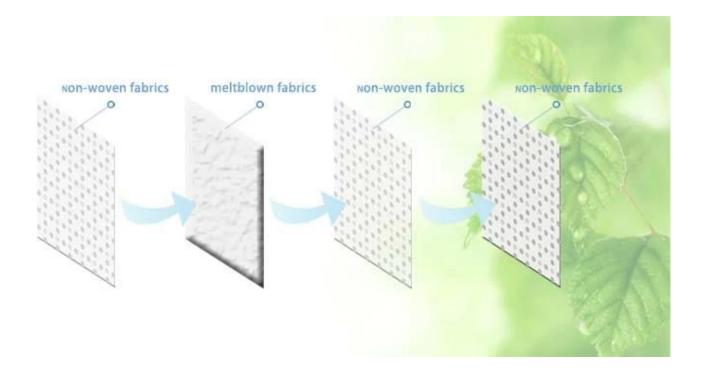

#### Portée applicable

peut être utilisé pour protéger les particules non grasses, réduire l'odeur de certains composés Oganic.

Particules non grasses: poussière (propriété minérale, poussière de fibre métallique) pollen et brume.

Qui peut être utilisé pour protéger l'environnement pollution atmosphérique particules fines PM 2,5.

### Ne peut pas être adapté pour:

Les respirateurs ne produisent pas d'oxygène, pas dans un environnement déficient en oxygène.

**SOUVIENS**: Ne peut être utilisé pour les polluants, la mauvaise utilisation conduira à la maladie ou même la mort.

# professional

# Invisible potential threats in the air

### removed dust







Industrial dust

Sand invasion

Pollen allergens






PM2.5

Secondhand smoke



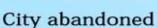



journey



Harmful bacteria

## Étapes d'utilisation

### Etape 1

Ouvrez le masque, coupez le nez.Les deux mains ont été tirées côté de la bande, de sorte que le dossier du nez au-dessus du masque.

Etape 2

Mettez le masque contre le menton.

Etape 3

Tirez la bande à l'oreille.

étape 4

Placez vos mains au milieu de l'agrafe en métal de nez.Du milieu du nez par le statu quo, jusqu'à près du pont du nez.

Etape 5 Dans la zone de travail, Sentir la fuite d'air du nez, devrait être ré-ajuster l'agrafe de nez. Si vous ne sentez pas de débordement d'air peut pénétrer dans la zone de travail.

