

Respirateur de sécurité sain [Les masques](#) Poussière Allergènes de pollen Masques de grippe




Caractéristiques:

Ingénierie du corps humain Conception stéréo 3D

Non-tissé multicouche et fusion-soufflée, total 4 couches

La ceinture en aluminium tient la forme

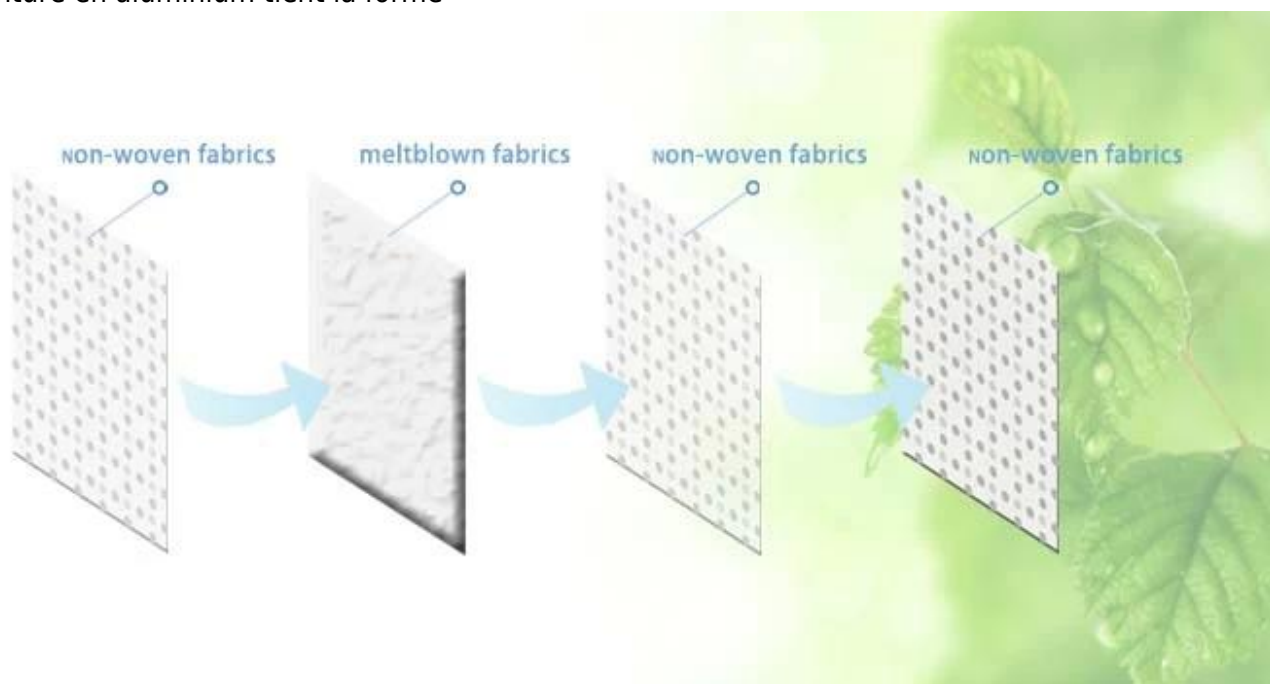

Portée applicable

peut être utilisé pour protéger les particules non huileuses, réduire l'odeur de certains composés organiques.

Particules non grasses: poussière (propriété minérale, poussière de poussière de métal) pollen et brume.

Qui peut être utilisé pour protéger la pollution de l'air de l'environnement des particules fines PM 2,5.

Ne peut pas convenir à:

[Respirateurs](#) ne produisent pas d'oxygène, pas dans un environnement pauvre en oxygène.

Rappelez-vous: Ne peut être utilisé pour les polluants, la mauvaise utilisation conduira à la maladie ou même la mort.



Étapes à suivre pour l'utilisation

étape 1

Ouvrez le [masque](#), pince-nez. Les deux mains ont été tirées du côté de la bande, de sorte que le dossier du nez au-dessus du masque.

étape 2

Mettez le masque contre le menton.

étape 3

Tirez la bande à l'oreille.

étape 4

Placez vos mains au milieu du pince-nez métallique. Du milieu du nez par le statu quo, jusqu'à proximité du pont du nez.

étape 5

Dans la zone de travail, sentir la fuite d'air du nez, devrait être réajuster le clip de nez. Si vous sentez

pas de débordement d'air peut entrer dans la zone de travail.

