


فريدة من نوعها تصميم جديد للإنسان أربع طبقات الغبار الحساسية الإنفلونزا قناع حلقه التنفس سلامه صحة التنفس الحارة التزلج الدرجات نصف الوجه أفنعه الفم مرشحات الغبار حبوب اللقاح الحساسية الجراثيم الإنفلونزا أفنعه



:

تصميم ستيريو dهندسه الجسم البشري 3  
الانسجه غير المنسوجة متعددة الطبقات والمخلوطة ، مجموع 4 طبقات  
حزام ألومنيوم عقد الشكل

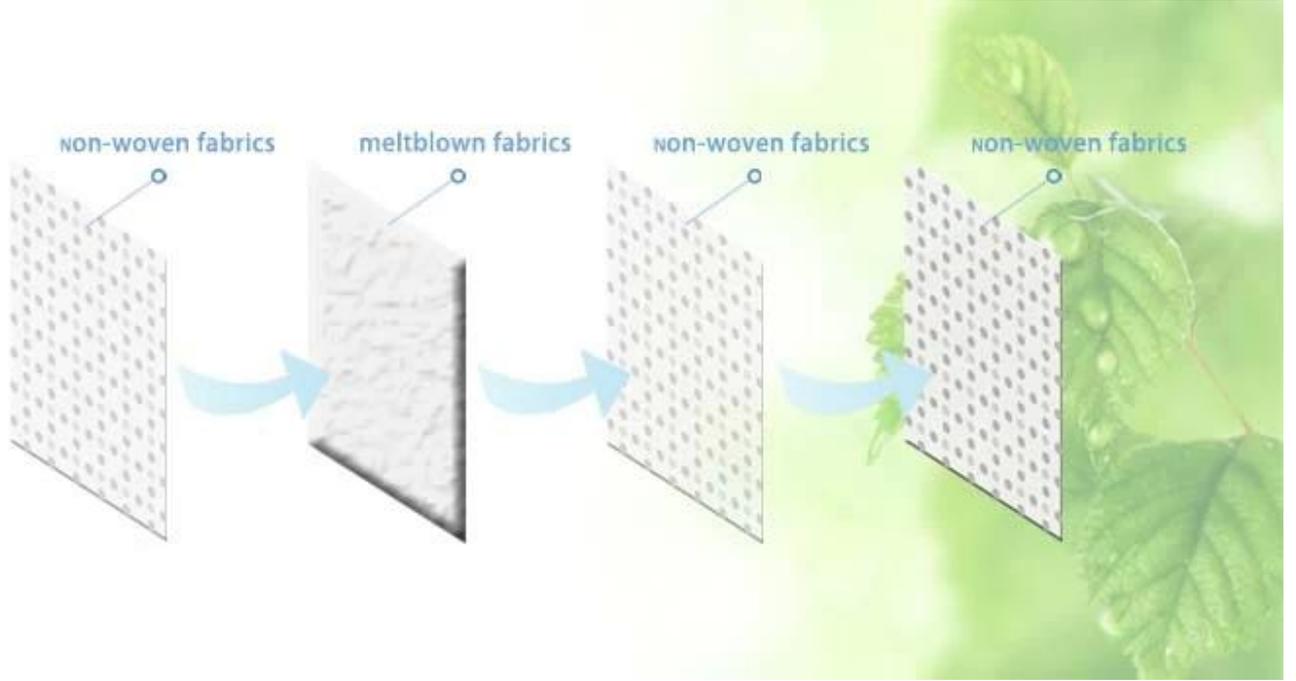

### النطاق المنطبق

ويمكن استخدامها لحماية الجزيئات غير الزيتية ، والحد من رائحة بعض المركبات اوغانيتش. الجسيمات غير الزيتية: الغبار (الممتلكات المعدنية ، غبار ألياف المعدنية الغبار) حبوب اللقاح والضباب. PM 2.5 التي يمكن استخدامها لحماية البيئة تلوث الهواء الجسيمات غرامه

**لا يمكن ان تكون مناسبه ل:**

ولا تنتج أجهزه التنفس الأوكسجين ، وليس في بيئة تفتقر إلى الأوكسجين

**تذكر: يمكن استخدامها فقط للملوثات ، والاستخدام الخاطئ سيؤدي إلى المرض أو حتى الموت**

professional  
removed dust

## Invisible potential threats in the air



Industrial dust



Sand invasion



Pollen allergens



PM2.5



Secondhand smoke



City abandoned



journey



Harmful bacteria

### خطوات الاستخدام

الخطوة 1

افتح القناع وأخرجه من الأنف وقد سحبت كلتا اليدين جانب من الفرقة ، بحيث الأنف المجلد فوق القناع

الخطوة 2

ضع القناع ضد الذقن

الخطوة 3

اسحب الفرقة إلى الأذن

الخطوة 4

ضع يديك في منتصف مشبك الأنف المعدني من منتصف الأنف من قبل الوضع الراهن ، حتى قربه من جسر الأنف

الخطوة 5

في مجال العمل ،يشعر تسرب الهواء من الأنف ، وينبغي أعاده ضبط مقطع الأنف.إذا كنت تشعر بعدم وجود فائض

الهواء يمكن ان تدخل منطقه العمل.

