

Maska proti znečištění hlavě VT102 respirátor na masku proti prachu.


- Jedinečný tvar konstrukce umožňuje nízký profil a dobrou kondici
- Zvýšený komfort díky snadno nastavitelnému nosníku mostu
- Vysoká hustota a vysoká degradací maska pro PM2, 5



Klíčové vlastnosti

- Jedinečný tvar konstrukce umožňuje nízký profil a dobrou kondici
- Zvýšený komfort díky snadno nastavitelnému nosníku mostu
- Extra hladký pěnový pás uvnitř masky
- Snadné dýchání díky robustnímu filtračnímu médiu
- Pro prostředí pro prach a mlhu
- Profesionální média z mikrovlákná
- Vysoká degradace materiálu

4 layers protection

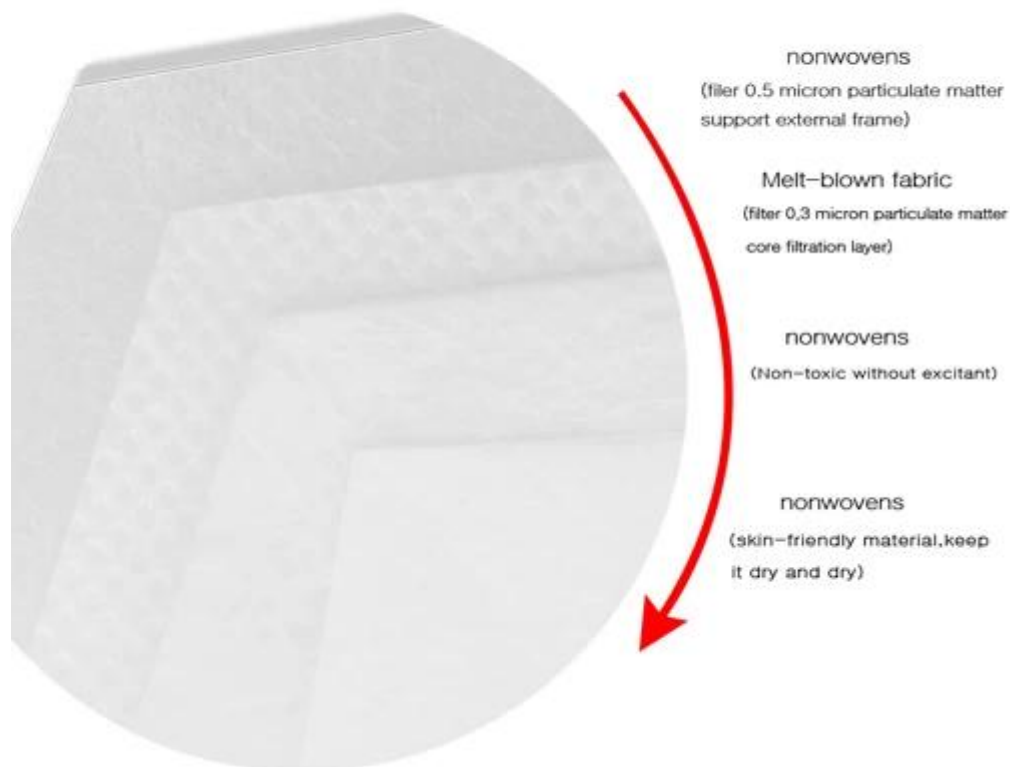

Kroky pro použití

Krok 1: vyberte správnou velikost respirátoru, který jste byli namontováni.

Krok 2: Umístěte dlaně přes smyčky vašeho respirátor a pohár ji přes obličej.

Krok 3: Umístěte respirátor na pokrytí nosu a brady.

Krok 4: s jednou rukou drží respirátor, použijte druhou stranu umístit první popruh na temeno hlavy (nad uši), pak umístěte druhý popruh na zadní straně krku.

Krok 5: pomocí dvou prstů obou rukou, stiskněte dolů kovový kus podle obrysu vašeho nosu mostu. (nikdy špetka kovový kus!)

Krok 6: s oběma rukama přes respirátor, výdech silně kontrolovat únik kolem něj.

Krok 7: únik je evidentní, když se vaše vlasy pohybuje během silné výdechu. Pokud nosíte brýle, zamlžení brýlí indikuje netěsnost.

Krok 8: je-li zjištěna netěsnost vzduchu, upravte respirátor, popruhy a nos kus před zkouškou znovu.

