
Einzigartig neues Design für die menschliche vier Schichten Staub Allergie Flu Ohrbügel Mask Atem gesund Gesundheit Atemwege warme Ski Radfahren halb Gesicht Mund Masken Filter Staub Pollen Allergene Grippe Keime Masken



Features:

Human Body Engineering 3D Stereo Design Mehrschichtige Gewebe und Meltblown, insgesamt 4 Schichten Aluminium Gürtel Hold Shape

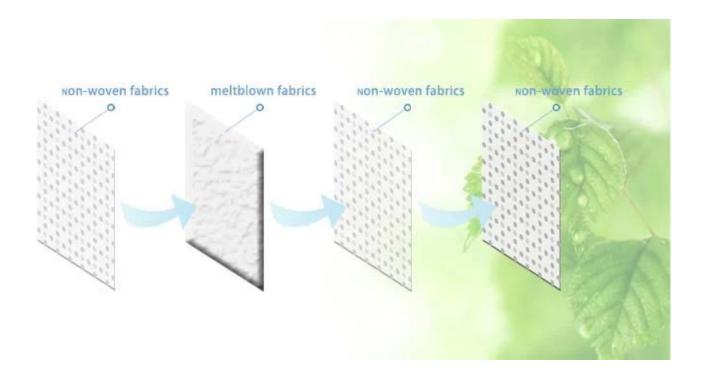

Anwendbares Geltungsbereich

kann verwendet werden, um nicht-Fette Partikel zu schützen, den Geruch einiger oganic Verbindungen zu verringern.

Nicht-Fette Partikel: Staub (Mineral-Eigenschaft, metallische Staub-Staub) Pollen und Dunst. Die Verwendung zum Schutz der Umwelt Luftverschmutzung Fine Particle pm 2,5.

Kann nicht geeignet für:

Die Atemwege produzieren keinen Sauerstoff, nicht in der Sauerstoff-mangelhaften Umgebung.

Denken Sie daran: Kann nur für Schadstoffe verwendet werden, wird die falsche Verwendung zu Krankheiten oder sogar Tod führen.

professional removed dust

Invisible potential threats in the air







Industrial dust

Sand invasion

Pollen allergens





PM2.5

Secondhand smoke







City abandoned

journey

Harmful bacteria

Schritte für die Verwendung

Schritt 1

Öffne die Maske, Nase Clip aus.Beide Hände wurden seitlich der Band gezogen, so dass der Nase-Ordner oberhalb der Maske.

Schritt 2

Leg die Maske gegen das Kinn.

Schritt 3

Ziehen Sie die Band ans Ohr.

Schritt 4

Platzieren Sie Ihre Hände mitten in der Metal Nose Clip. Von der Mitte der Nase durch den Status quo, bis in der Nähe der Brücke der Nase.

Schritt 5

In den Arbeitsbereich, Spüren Sie die Luft Leck von der Nase, sollte neu-justieren Sie die Nase Clip. Wenn Sie spüren, dass kein Luftstrom in den Arbeitsbereich eindringen kann.









