

Einzigartig neues Design für die menschliche vier Schichten Staub Allergie Flu Ohrbügel Mask  
Atem gesund Gesundheit Atemwege warme Ski Radfahren halb Gesicht Mund Masken Filter  
Staub Pollen Allergene Grippe Keime Masken




**Features:**

Human Body Engineering 3D Stereo Design

Mehrschichtige Gewebe und Meltblown, insgesamt 4 Schichten

Aluminium Gürtel Hold Shape

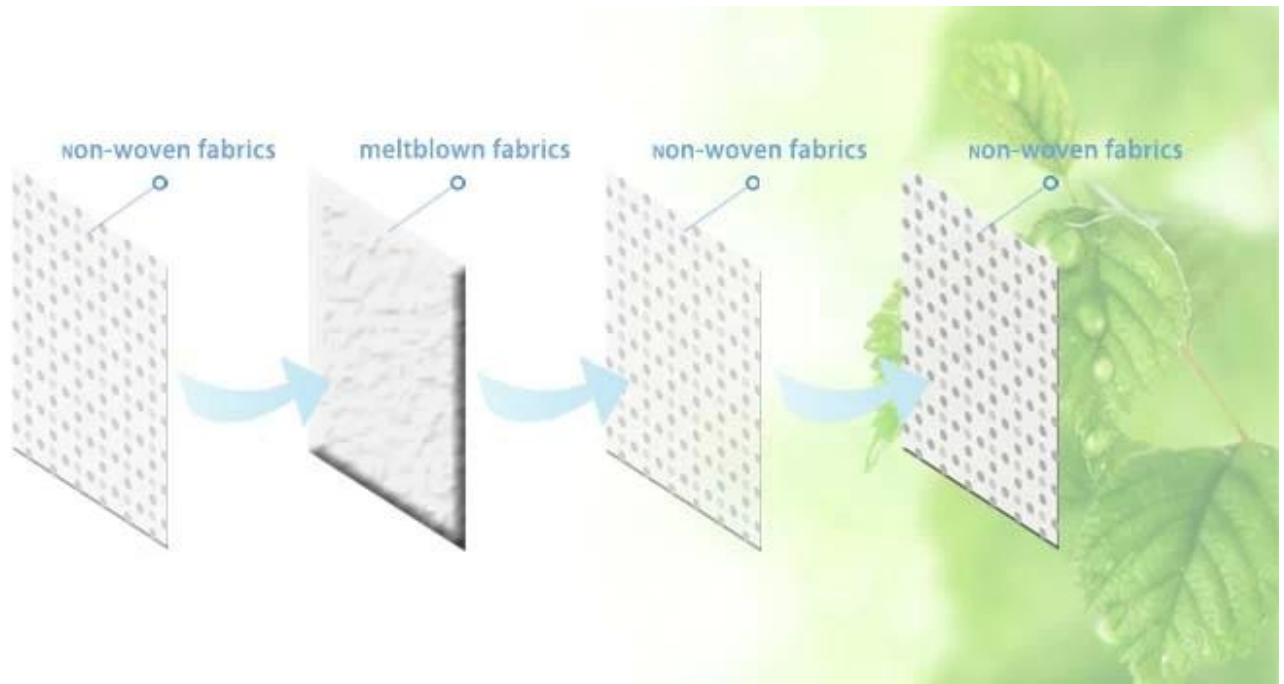

### **Anwendbares Geltungsbereich**

kann verwendet werden, um nicht-Fette Partikel zu schützen, den Geruch einiger organic Verbindungen zu verringern.

Nicht-Fette Partikel: Staub (Mineral-Eigenschaft, metallische Staub-Staub) Pollen und Dunst. Die Verwendung zum Schutz der Umwelt Luftverschmutzung Fine Particle pm 2,5.

#### **Kann nicht geeignet für:**

Die Atemwege produzieren keinen Sauerstoff, nicht in der Sauerstoff-mangelhaften Umgebung.

**Denken Sie daran:** Kann nur für Schadstoffe verwendet werden, wird die falsche Verwendung zu Krankheiten oder sogar Tod führen.

professional  
removed dust

## Invisible potential threats in the air



Industrial dust



Sand invasion



Pollen allergens



PM2.5



Secondhand smoke



City abandoned



journey



Harmful bacteria

### Schritte für die Verwendung

Schritt 1

Öffne die Maske, Nase Clip aus. Beide Hände wurden seitlich der Band gezogen, so dass der Nase-Ordner oberhalb der Maske.

Schritt 2

Leg die Maske gegen das Kinn.

Schritt 3

Ziehen Sie die Band ans Ohr.

Schritt 4

Platzieren Sie Ihre Hände mitten in der Metal Nose Clip. Von der Mitte der Nase durch den Status quo, bis in der Nähe der Brücke der Nase.

## Schritt 5

In den Arbeitsbereich, Spüren Sie die Luft Leck von der Nase, sollte neu-justieren Sie die Nase Clip. Wenn Sie spüren, dass kein Luftstrom in den Arbeitsbereich eindringen kann.

