

Medexpro bietet höchste Qualität [Masken](#) die gedruckt werden können [Logo](#). Wenn Sie interessiert sind, pls Anfrage mich.

Unsere Masken sind alle 3D-Design und es gibt sechs Arten.



[Kunden Artikel](#)

Das eigene Produkt selbst gehört zur Besonderheit. Nach der Bestätigung der angepassten Probe kann das Produkt nicht mehr geändert werden. Es wird vorgeschlagen, die Informationen mit dem Kundendienst vor der Produktion zu bestätigen.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable



Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

Schritte für die Verwendung

Schritt 1

Öffnen Sie die Maske, Nase Clip aus. Beide Hände wurden Seite des Bandes gezogen, so dass die Nase Ordner oberhalb der Maske.

Schritt 2

Legen Sie die Maske gegen das Kinn.

Schritt 3

Ziehen Sie das Band an das Ohr.

Schritt 4

Legen Sie Ihre Hände in die Mitte der Metall-Nasenklemme. Von der Mitte der Nase durch den Status quo, bis in der Nähe der Brücke der Nase.

Schritt 5

In den Arbeitsbereich, spüren Sie die Luft Leck aus der Nase, sollte re-Adjust die Nasenklemme. Wenn Sie glauben, dass kein Luft Überlauf in den Arbeitsbereich eindringen kann.

