

Medexpro proporciona las máscaras de calidad superior que se pueden imprimir [logo](#). Si usted está interesado, la investigación de los pls yo.

Nuestro [máscaras](#) son todo diseño 3D y hay seis clases.



Artículos de clientes

El producto personalizado en sí pertenece a la particularidad. Después de confirmar la muestra personalizada, el producto no puede ser cambiado. Se sugiere confirmar la información con el servicio de atención al cliente antes de la producción.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable

logo+ diagram

Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

Pasos para el uso

Paso 1: seleccione el tamaño correcto del respirador que usted fue instalado.

Paso 2: Coloque la palma de la mano a través de los bucles de su respirador y colóquelo sobre su cara.

Paso 3: Coloque el respirador para cubrir la nariz y la barbilla.

Paso 4: con una mano sosteniendo el respirador, use la otra mano para colocar la primera correa en la corona de la cabeza (por encima de las orejas), luego coloque la segunda correa en la parte posterior del cuello.

Paso 5: usando dos dedos de ambas manos, presione la pieza metálica de acuerdo al contorno de su puente nasal. (i nunca pellizque la pieza metálica!)

Paso 6: con ambas manos sobre el respirador, Exhale fuertemente para comprobar si hay fugas alrededor de ella.

Paso 7: la fuga es evidente cuando el cabello se mueve durante la exhalación fuerte. Si usa anteojos, el empañamiento de los anteojos indica fugas.

Paso 8: si se observa fuga de aire, ajuste el respirador, las correas y la pieza de la nariz antes de volver a probar.

