


Nuevo diseño único para humanos cuatro capas de polvo alergia gancho mascarilla respiración sana seguridad respirador caliente esquí ciclismo media boca mascarilla filtros polvo polen alérgenos gripe gérmenes máscaras



Características:

Diseño estéreo 3D de ingeniería de cuerpo humano
Multicapa no tejidas de tela y meltblown, total de 4 capas
Forma del asimiento de la correa de aluminio

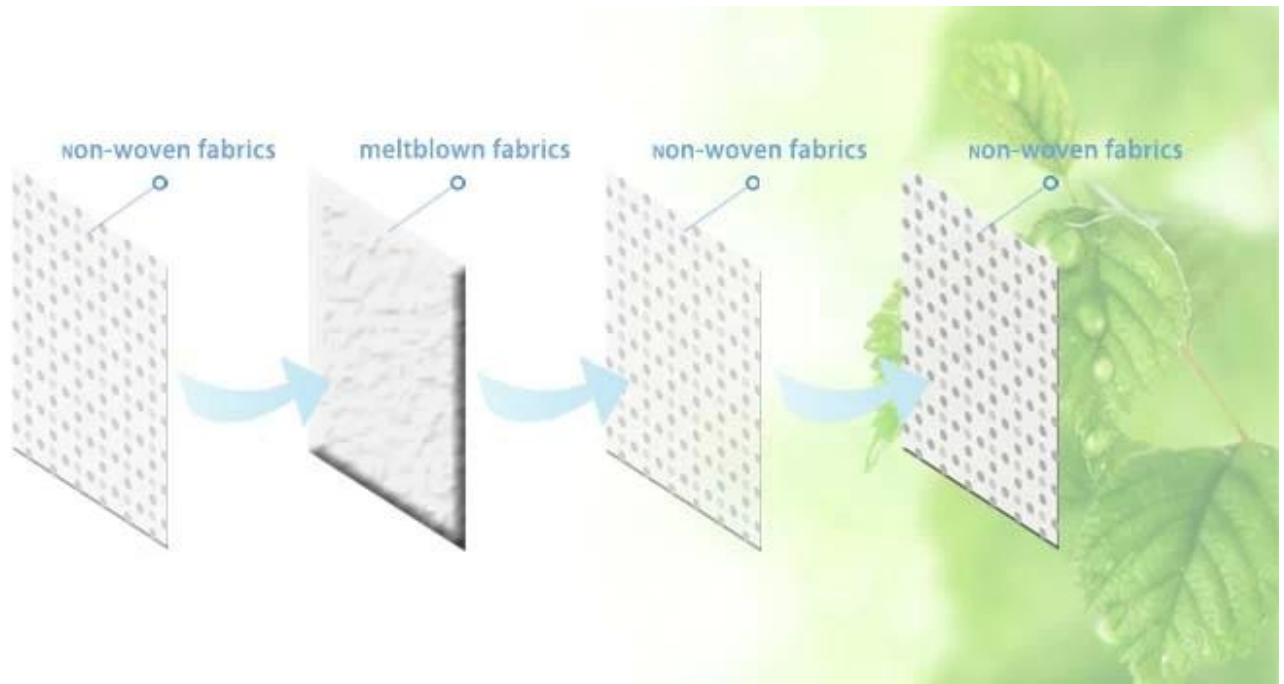

Alcance aplicable

puede ser utilizado para proteger las partículas no aceitosas, reduce el olor de algunos compuestos orgánicos.

Partículas no aceitosas: polvo (característica mineral, polvo metálico de la fibra del polvo) polen y calina.

Que se puede utilizar para proteger el ambiente contaminación atmosférica partículas finas PM 2,5.

No puede ser adecuado para:

Los respiradores no producen oxígeno, no en un ambiente con deficiencia de oxígeno.

recuerdo: Sólo se puede utilizar para los contaminantes, el uso incorrecto conducirá a la enfermedad o incluso la muerte.

professional
removed dust

Invisible potential threats in the air



Industrial dust



Sand invasion



Pollen allergens



PM2.5



Secondhand smoke



City abandoned



journey



Harmful bacteria

Pasos para el uso

Paso 1

Abre la máscara, saca la nariz. Ambas manos fueron tiradas del lado de la banda, de modo que la carpeta de la nariz sobre la máscara.

Paso 2

Ponga la mascarilla contra la barbilla.

Paso 3

Tire de la banda a la oreja.

Paso 4

Coloque las manos en el medio del clip metálico de la nariz. Desde el medio de la nariz por el status quo, hasta cerca del puente de la nariz.

Paso 5

En el área de trabajo, Sentir la fuga de aire de la nariz, se debe volver a ajustar el clip de la nariz. Si usted siente que no hay desbordamiento de aire puede entrar en el área de trabajo.

