

Respirador de seguridad saludable [Máscaras](#) Alergenos de polen de polvo Máscaras de gérmenes de gripe



características:

Cuerpo humano, ingeniería, 3D, estéreo, diseño

Tejido multicapa no tejido y soplado en fusión, 4 capas en total

Forma de sujeción de correa de aluminio



Alcance aplicable

se puede usar para proteger partículas no grasosas, reducir el olor de algunos compuestos orgánicos.

Partículas no grasas: polvo (propiedades minerales, polvo de fibra de polvo metálico), polen y neblina.

Que se puede utilizar para proteger el medio ambiente de partículas finas de partículas PM 2.5.

No puede ser adecuado para:

[Respiradores](#) no produce oxígeno, no en un ambiente deficiente de oxígeno.

recuerde: solo se puede usar para contaminantes, el uso incorrecto provocará enfermedades o incluso la muerte.



Pasos para el uso

paso 1

Abre el [máscara](#), clip de nariz fuera. Ambas manos fueron tirados del lado de la banda, de modo que la carpeta de la nariz encima de la máscara.

paso 2

Pon la máscara contra la barbilla.

paso 3

Tire de la banda a la oreja.

etapa 4

Coloque sus manos en el medio del clip de nariz de metal. Desde el medio de la nariz por el status quo, hasta cerca del puente de la nariz.

paso 5

En el área de trabajo, sentir la fuga de aire de la nariz, debe volver a ajustar el clip de la nariz. Si no siente que el aire se desborda, puede ingresar al área de trabajo.

