

Características:

Jumbo LCD

Exactitud:  $\pm 0.05$  °C ( $\pm 0.1$  °F)

Alarma de la fiebre

Última memoria de lectura

Punta rígida

Indicador de batería baja

Apagado automático

Diseñado para uso oral




Instrucciones para el usuario:

STEP1. Presione el botón ON/OFF junto a la pantalla LCD. Un tono sonará como muestra la pantalla, seguida de la última temperatura de la memoria.

Después de mostrar la temperatura de prueba automática, el termómetro está ahora en el modo de prueba.

\* Note: Si la temperatura medida es menos que 32 °C o 90 °F, el LCD exhibirá lo, si la temperatura medida es más alta que 42,9 °C o 109,9 °F, el LCD exhibirá Hola.

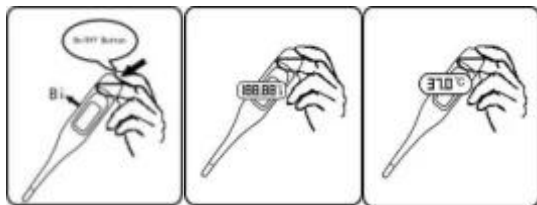


Step2. Coloque el termómetro en la ubicación deseada (boca)

a) uso oral: Coloque el termómetro debajo de la lengüeta como se indica en la posición "v". Cierre la boca y respire uniformemente a través de la nariz para evitar que la medición sea influida por el aire inhalado/espirado. Temperatura normal entre 35,7 °C y 37,3 °C (96.3 °F y 99,1 °F)

3.

El signo de grado parpadea durante todo el proceso de prueba. Cuando el parpadeo se detiene, una alarma emitirá unos 10 segundos. La lectura medida aparecerá en la pantalla LCD simultáneamente. El tiempo de medición mínimo hasta que el tono de señalización (bip) se debe mantener sin excepción. La medición continúa incluso después de la notificación de timbre. La temperatura visualizada no cambiará cuando el termómetro sea retirado de su posición de prueba.

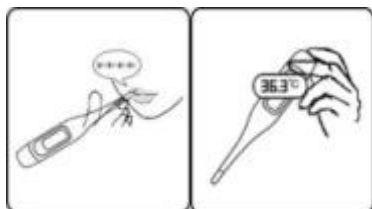

4.

Para prolongar la duración de la batería, presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) para apagar la unidad después de haber completado las pruebas. Si no se toma ninguna acción, la unidad se apagará automáticamente después de around10 minutos. Guarde el termómetro en su estuche protector.

