

Medexpro proporciona máscaras de alta calidad que se pueden imprimir **logo**. Si usted está interesado, me pregunta por favor.

Nuestra [máscaras](#) son todos diseños 3D y hay seis tipos.




Fabricante profesional de [máscara](#) con suficiente en stock.

Artículos de clientes

El producto personalizado en sí pertenece a la particularidad. Después de confirmar la muestra personalizada, el producto no se puede cambiar. Se sugiere confirmar la información con el servicio

al cliente antes de la producción.

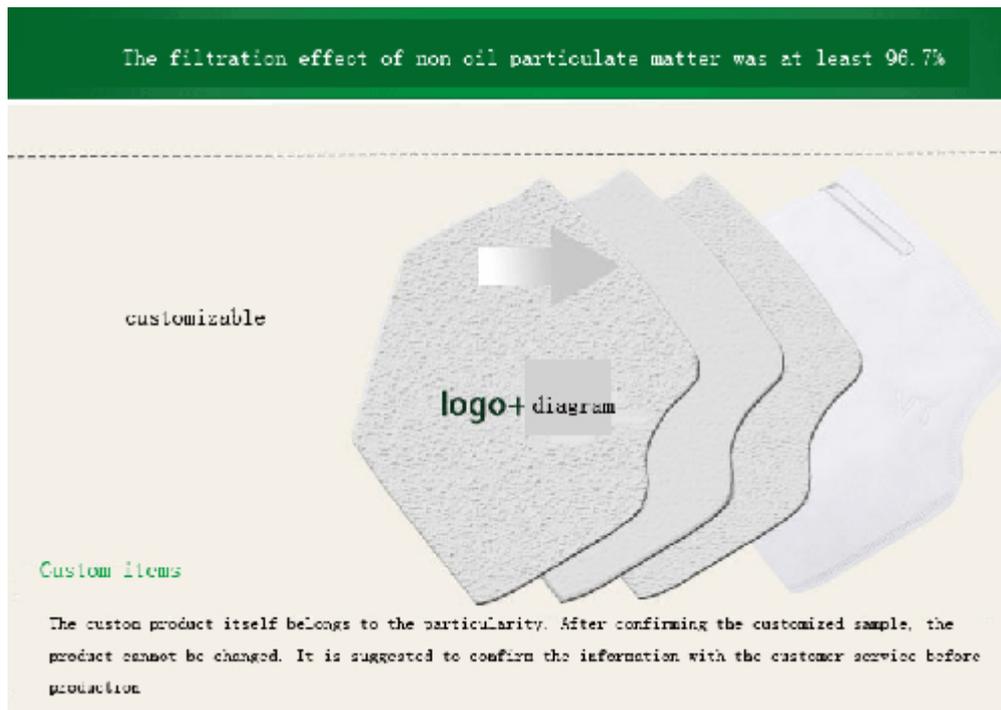

Pasos para el uso

paso 1

Abre el [máscara](#), clip de nariz fuera. Ambas manos fueron tirados del lado de la banda, de modo que la carpeta de la nariz encima de la máscara.

paso 2

Pon la máscara contra la barbilla.

paso 3

Tire de la banda a la oreja.

etapa 4

Coloque sus manos en el medio del clip de nariz de metal. Desde el medio de la nariz por el status quo, hasta cerca del puente de la nariz.

paso 5

En el área de trabajo, sentir la fuga de aire de la nariz, debe volver a ajustar el clip de la nariz. Si no siente que el aire se desborda, puede ingresar al área de trabajo.

