

Medexpro fournit des masques de haute qualité qui peuvent être imprimés [logo](#). Si vous êtes intéressé, les pls m'interrogent.

Notre [masques](#) sont tous les design 3D et il ya six sortes.



## Articles clients

Le produit personnalisé lui-même appartient à la particularité. Après avoir confirmé l'échantillon personnalisé, le produit ne peut pas être modifié. Il est suggéré de confirmer l'information avec le service à la clientèle avant la production.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable

logo+ diagram

#### Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

### Étapes d'utilisation

Étape 1: sélectionnez la taille correcte du respirateur que vous avez montée.

Étape 2: Placez votre paume dans les boucles de votre respirateur et tassez-la sur votre visage.

Étape 3: Positionner le respirateur pour couvrir le nez et le menton.

Étape 4: avec une main tenant le respirateur, utilisez l'autre main pour placer la première sangle sur la Couronne de la tête (au-dessus des oreilles), puis placez la deuxième sangle sur l'arrière du cou.

Étape 5: en utilisant deux doigts des deux mains, enfoncez la pièce en métal en fonction du contour de votre pont nasal. (ne jamais pincer la pièce en métal!)

Étape 6: avec les deux mains sur le respirateur, expirez fortement pour vérifier la fuite autour de lui.

Étape 7: les fuites sont évidentes lorsque vos cheveux se déplacent pendant la forte expiration. Si vous portez des lunettes, la buée des lunettes indique une fuite.

Étape 8: si une fuite d'air est notée, réglez le respirateur, les sangles et le morceau de nez avant de les tester à nouveau.

