


## Caractéristiques:

Conception 3D stéréo de fuselage humain d'ingénierie

Tissu non tissé multicouche et meltblown, total 4 couches

Forme de maintien de ceinture en aluminium

# 4 layers protection

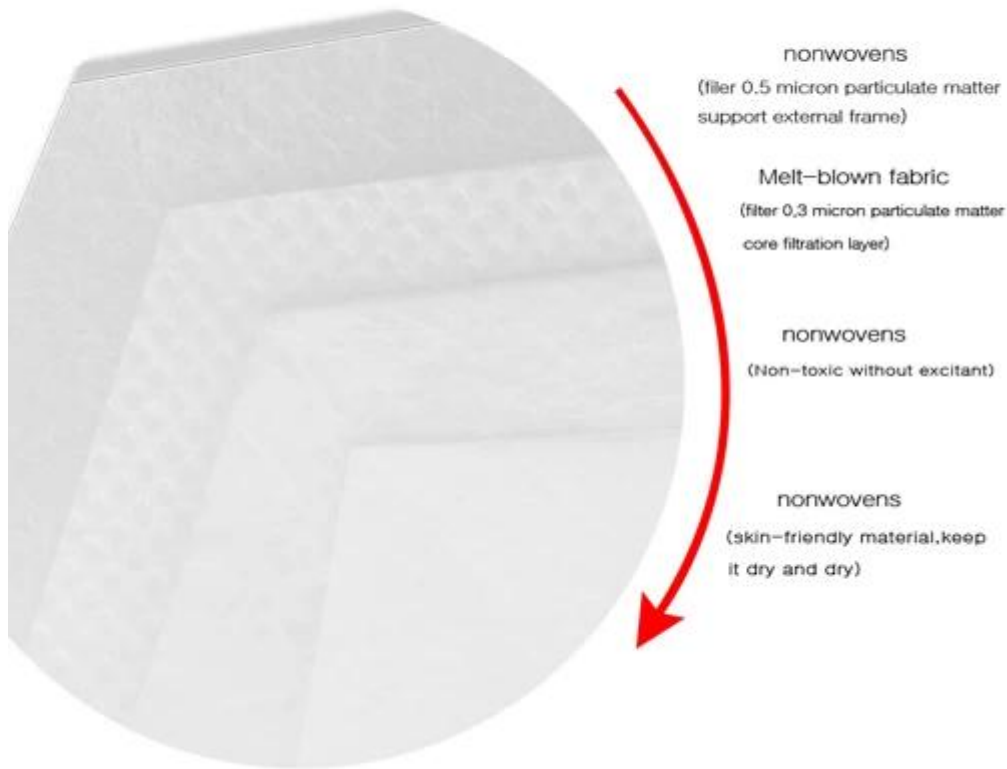

## Étapes d'utilisation

### Etape 1

Ouvrez le masque, coupez le nez. Les deux mains ont été tirées côté de la bande, de sorte que le dossier du nez au-dessus du masque.

### Etape 2

Mettez le masque contre le menton.

### Etape 3

Tirez la bande à l'oreille.

### étape 4

Placez vos mains au milieu de l'agrafe en métal de nez. Du milieu du nez par le statu quo, jusqu'à près du pont du nez.

### Etape 5

Dans la zone de travail, sentir la fuite d'air du nez, devrait être ré-ajuster l'agrafe de nez. Si vous ne sentez pas de débordement d'air peut pénétrer dans la zone de travail.



## Gamme d'utilisation

peut être utilisé pour protéger les particules non grasses, réduire l'odeur de certains composés Organiques.

Particules non grasses: poussière (propriété minérale, poussière de fibre métallique) pollen et brume  
Qui peut être utilisé pour protéger l'environnement pollution atmosphérique particules fines PM 2,5

Ne peut pas être adapté pour:

Les respirateurs ne produisent pas d'oxygène, pas dans un environnement déficient en oxygène

## Guard your family and your health

Prevention of UV rays    Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions

