

Medexpro offre une qualité supérieure [masques](#) qui peut être imprimé **logo**. Si vous êtes intéressé, les pls m'interrogent.

Nos masques sont tous de conception 3D et il ya six sortes.



Articles clients

Le produit personnalisé lui-même appartient à la particularité. Après avoir confirmé l'échantillon personnalisé, le produit ne peut pas être modifié. Il est suggéré de confirmer l'information avec le service à la clientèle avant la production.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable



Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

Étapes d'utilisation

étape 1

Ouvrez le masque, pincez le nez. Les deux mains ont été tirées côté de la bande, de sorte que le dossier du nez au-dessus du masque.

étape 2

Mettez le masque contre le menton.

étape 3

Tirez la bande vers l'oreille.

étape 4

Placez vos mains au milieu de l'agrafe en métal de nez. Du milieu du nez par le statu quo, jusqu'à près du pont du nez.

étape 5

Dans la zone de travail, sentir la fuite d'air du nez, devrait être ré-ajuster le clip de nez. Si vous sentez qu'aucun débordement d'air ne peut pénétrer dans la zone de travail.

