

Medexpro offre une qualité supérieure [masques](#) qui peut être imprimé [logo](#). Si vous êtes intéressé, les pls m'interrogent.

Nos masques sont tous de conception 3D et il ya six sortes.



## Articles clients

Le produit personnalisé lui-même appartient à la particularité. Après avoir confirmé l'échantillon personnalisé, le produit ne peut pas être modifié. Il est suggéré de confirmer l'information avec le service à la clientèle avant la production.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable

logo+ diagram

### Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

## Étapes d'utilisation

Effectuer l'hygiène des mains avant de mettre le masque.

Choisissez la taille correcte du masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de défauts.

1. Tenez le VT103 dans votre paume avec le embout au bout des doigts, accrochez les sangles d'oreille librement sous la main.

2. Positionnez le 103v sous votre menton avec le embout vers le haut.

Tout en tenant le VT103 en place, tirez les deux sangles sur chaque oreille.

3. et puis tirer le cerceau à une autre sangle, le faire en place sur le cou.

4. Si vous avez les cheveux longs, la sangle doit être positionnée sous vos cheveux.

Positionnez le VT103 bas sur votre nez.

5. en utilisant les deux mains, Moulez le embout à la forme de votre nez en poussant vers le bas et vers l'extérieur.

Tout en déplaçant vos doigts vers le bas des deux côtés de la embout.

6. Effectuez un contrôle d'ajustement en plaçant les deux mains complètement sur le masque.

Veillez à ne pas déranger la position et expirez brusquement.

Si'il y a des fuites autour de votre nez, réglez le embout comme décrit à l'étape 5.

Si l'air fuit aux bords du masque, ajustez les courroies en arrière sur les côtés de votre tête.

Effectuer la vérification de l'ajustement si un réglage est effectué.



Fabricant professionnel de masque avec assez en stock.