

Respiratore di sicurezza sano [Maschere](#) Polvere di polline Allergeni Maschere antinfluenzali




Caratteristiche:

Progettazione stereo 3D del corpo umano

Tessuto non tessuto multistrato e soffiato a fusione, totale 4 strati

Forma di tenuta della cintura in alluminio

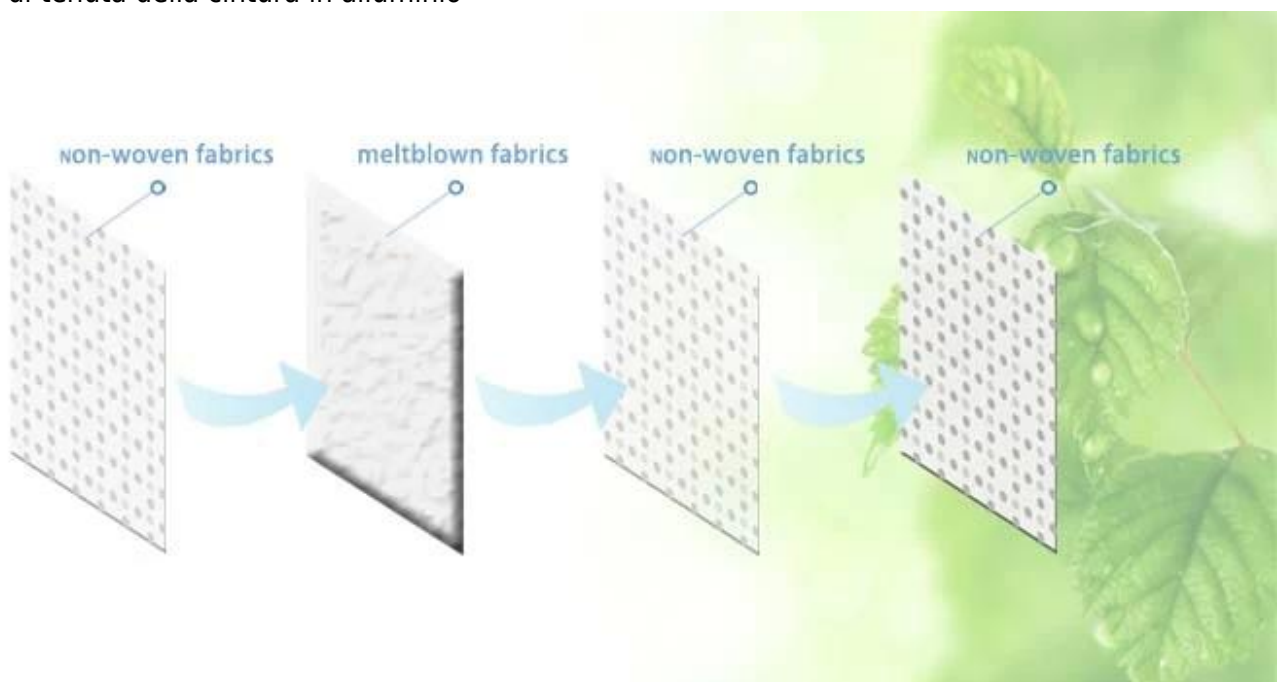

Ambito applicabile

può essere usato per proteggere le particelle non oleose, ridurre l'odore di alcuni composti organici. Particolato non oleoso: polvere (proprietà minerale, polvere di polvere metallica) polline e foschia. Quale può essere utilizzato per proteggere l'inquinamento atmosferico particolato fine PM 2.5.

Non può essere adatto per:

[Respiratori](#) non produrre ossigeno, non in ambiente carente di ossigeno.

ricorda: può essere utilizzato solo per sostanze inquinanti, l'uso sbagliato porterà alla malattia o addirittura alla morte.



Passi per l'uso

passo 1

Apri il [maschera](#), clip per il naso fuori. Le mani sono state tirate lateralmente al cinturino, in modo che la cartella del naso sopra la maschera.

passo 2

Metti la maschera contro il mento.

passaggio 3

Tirare la fascia all'orecchio.

passaggio 4

Metti le mani al centro del fermaglio metallico. Dalla metà del naso dallo status quo, fino a vicino al ponte del naso.

passaggio 5

Nell'area di lavoro, avvertire la perdita d'aria dal naso, dovrebbe essere regolata nuovamente la clip del naso. Se non si avverte l'esondazione di aria può entrare nell'area di lavoro.

