


Caratteristiche:

Disegno stereo del corpo umano di ingegneria 3D

Tessuto non tessuto multistrato e Meltblown, totale 4 strati

Forma della stretta della cinghia di alluminio

4 layers protection

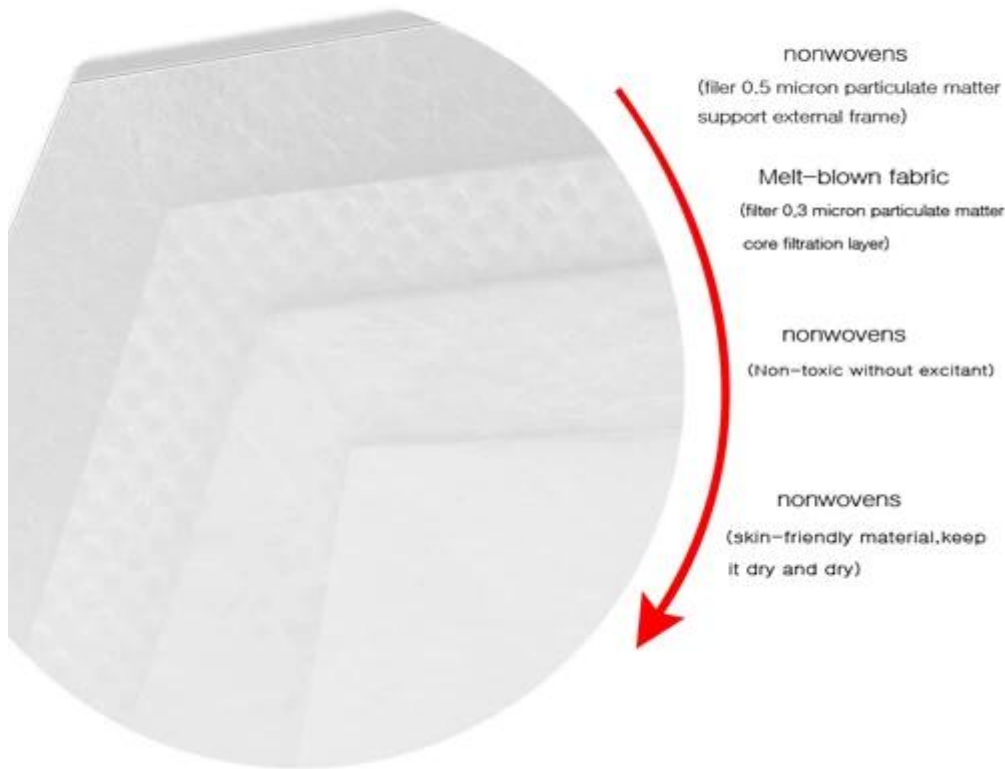

Procedura per l'utilizzo

fase 1

Apra la mascherina, clip del naso fuori. Entrambe le mani sono state tirate lato della banda, in modo che la cartella naso sopra la maschera.

fase 2

Metti la maschera contro il mento.

fase 3

Tirare la banda all'orecchio.

fase 4

Mettere le mani al centro della clip di metallo naso. Dalla metà del naso dallo status quo, fino a vicino al ponte del naso.

fase 5

Nell'area di lavoro, sentire la fuoriuscita dell'aria dal naso, dovrebbe essere ri-regolare la clip del naso. Se ritenete che nessun overflow di aria possa entrare nell'area di lavoro.



Intervallo di utilizzo

può essere utilizzato per proteggere le particelle non oleose, ridurre l'odore di alcuni composti organici.

Particolato non oleoso: polvere (proprietà minerale, polveri metalliche in fibra di polvere) polline e foschia

Che può essere utilizzato per proteggere l'ambiente inquinamento atmosferico particolato fine PM 2,5

Non può essere adatto per:

I respiratori non producono ossigeno, non in ambiente carente di ossigeno

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions

