

Medexpro fornisce qualità superiore [maschere](#) che può essere stampato **logo**. Se siete interessati, pls mi domandano.

Le nostre maschere sono tutte di design 3D e ci sono sei tipi.



### **Articoli per clienti**

Il prodotto personalizzato appartiene alla particolarità. Dopo aver confermato il campione personalizzato, il prodotto non può essere modificato. Si consiglia di confermare le informazioni con il servizio clienti prima della produzione.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable



#### Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

### Procedura per l'utilizzo

passaggio 1

Apra la mascherina, clip del naso fuori. Entrambe le mani sono state tirate lato della banda, in modo che la cartella naso sopra la maschera.

fase 2

Mettere la maschera contro il mento.

fase 3

Tirare la banda verso l'orecchio.

fase 4

Mettete le mani al centro del fermaglio per il naso metallico. Dal centro del naso con lo status quo, fino a vicino al ponte del naso.

passo 5

Nell'area di lavoro, sentire la perdita d'aria dal naso, dovrebbe essere ri-regolare la clip naso. Se si sente nessun overflow dell'aria può entrare nella zona di lavoro.

