

Mascherina antiinquinamento anti-VT102 maschera antipolvere.


- Design forma unica permette basso profilo e buona misura
- Maggiore comfort grazie al ponte nasale facilmente regolabile
- Alta densità e alta maschera di degradazione per PM 2.5



Caratteristiche principali

- Design forma unica permette basso profilo e buona misura
- Maggiore comfort grazie al ponte nasale facilmente regolabile
- Striscia di schiuma extra liscia all'interno della maschera
- Facile da respirare grazie a robusti supporti filtranti
- Per ambiente polvere e nebbia
- Media in microfibra professionale
- Elevato materiale di degradazione

4 layers protection

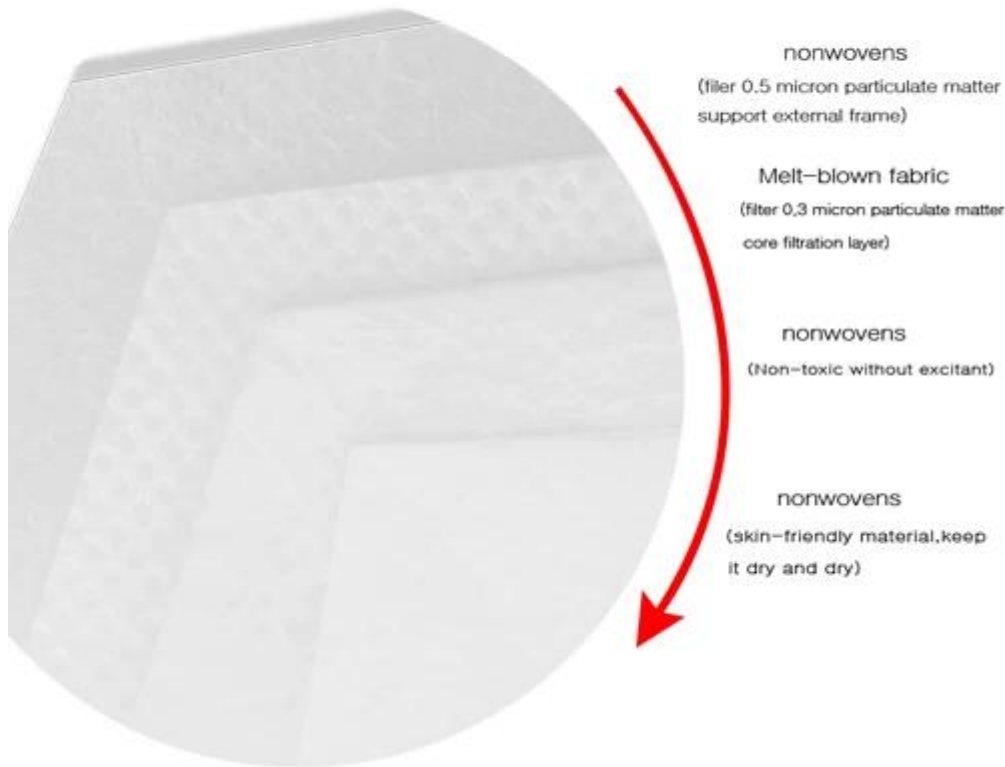

Procedura per l'utilizzo

Passo 1: selezionare la dimensione respiratoria corretta che è stato montato.

Punto 2: disponga la vostra palma attraverso i cicli del vostro respiratore e la tazza sopra la vostra faccia.

Fase 3: posizionare il respiratore per coprire il naso e il mento.

Punto 4: con una mano che tiene il respiratore, usi l'altra mano per disporre la prima cinghia sulla parte superiore della testa (sopra le orecchie), quindi disponga la seconda cinghia sulla parte posteriore del collo.

Punto 5: usando due barrette di entrambe le mani, premi giù la parte del metallo secondo il contorno del vostro ponticello del naso. (non pizzicare mai il pezzo di metallo!)

Punto 6: con entrambe le mani sopra il respiratore, espirate fortemente per controllare la perdita intorno esso.

Fase 7: la perdita è evidente quando i capelli si muovono durante la forte espirazione. Se si indossano occhiali, l'appannamento dei bicchieri indica perdite.

Punto 8: se la perdita dell'aria è notata, regolare il respiratore, le cinghie ed il pezzo anteriore prima della prova ancora.

