

Medexpro fornisce qualità superiore [maschere](#) che può essere stampato [logo](#). Se siete interessati, pls mi domandano.

Nostro [maschere](#) sono tutti di design 3D e ci sono sei tipi.



Articoli per clienti

Il prodotto personalizzato appartiene alla particolarità. Dopo aver confermato il campione personalizzato, il prodotto non può essere modificato. Si consiglia di confermare le informazioni con il servizio clienti prima della produzione.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable

logo+ diagram

Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

Procedura per l'utilizzo

Passo 1: selezionare la dimensione corretta del respiratore che è stata montata.

Punto 2: disponga la vostra palma attraverso i cicli del vostro respiratore e misuri sopra la vostra faccia.

Fase 3: posizionare il respiratore per coprire il naso e il mento.

Fase 4: con una mano che tiene il respiratore, utilizzare l'altra mano per posizionare la prima cinghia sulla sommità della testa (sopra le orecchie), quindi posizionare la seconda cinghia sulla parte posteriore del collo.

Passo 5: con due dita di entrambe le mani, premere il pezzo di metallo in base al contorno del ponte nasale. (mai pizzicare il pezzo di metallo!)

Passo 6: con entrambe le mani sopra il respiratore, espirare con forza per verificare la perdita intorno ad esso.

Fase 7: la perdita è evidente quando i vostri capelli si muove durante l'espiazione forte. Se si indossano occhiali, l'appannamento dei vetri indica perdite.

Fase 8: se si notano perdite d'aria, regolare il respiratore, le cinghie e il nasello prima di riprovare.

