

Medexpro fornece máscaras da qualidade superior que podem ser imprimidas [logotipo](#). Se você está interessado, o inquérito dos pls mim.

Nosso [máscaras](#) são todo o projeto 3D e há seis tipos.



Itens de clientes

O produto personalizado em si pertence à particularidade. Depois de confirmar a amostra personalizada, o produto não pode ser alterado. Sugere-se que confirme as informações com o serviço ao cliente antes da produção.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable

logo+ diagram

Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

Etapas para uso

Etapa 1: selecione o tamanho correto do respirador que você foi cabido.

Etapa 2: coloc sua palma através dos laços de seu respirador e do copo ele sobre seu rosto.

Passo 3: Posicione o respirador para cobrir o nariz e o queixo.

Passo 4: com uma mão segurando o respirador, use a outra mão para colocar a primeira cinta sobre a coroa da cabeça (acima das orelhas), em seguida, coloque a segunda cinta na parte de trás do pescoço.

Etapa 5: usando dois dedos de ambas as mãos, pressione para baixo a parte de metal de acordo com o contorno de sua ponte do nariz. (nunca belisque a peça de metal!)

Passo 6: com as duas mãos sobre o respirador, expire fortemente para verificar se há vazamento em torno dele.

Passo 7: vazamento é evidente quando o cabelo se move durante a expiração forte. Se usar óculos, nebulização dos óculos indicam vazamento.

Passo 8: se o vazamento de ar for notado, ajuste o respirador, as correias e a peça do nariz antes de testar novamente.

