

Respirador de Segurança Saudável [Máscaras](#) Máscaras dos germes da gripe dos alérgenos do pólen de poeira




Características:

Corpo humano engenharia 3D design estéreo

Tecido não tecido multicamadas e meltblown, total de 4 camadas

Forma de espera cinto de alumínio

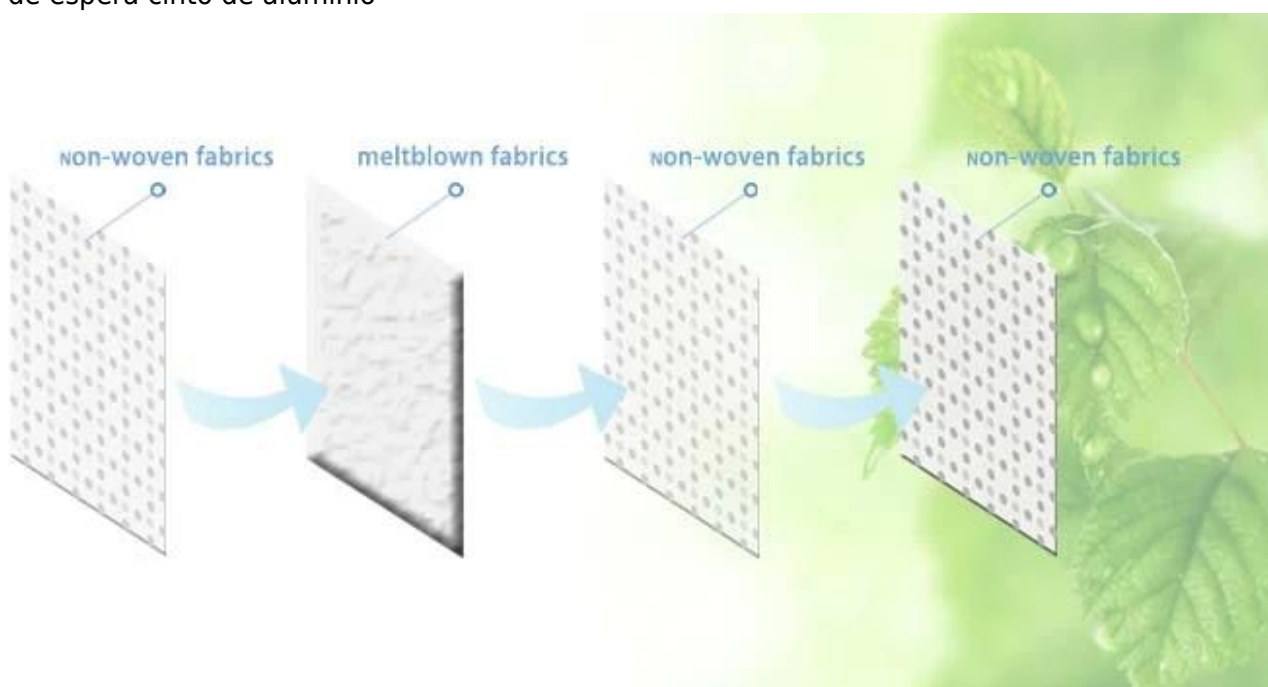

Escopo aplicável

pode ser usado para proteger partículas não oleosas, reduzir o odor de alguns compostos orgânicos. Partículas não oleosas: poeira (propriedade mineral, poeira de fibra metálica) pólen e neblina. Que pode ser usado para proteger a poluição atmosférica do ar, partículas finas PM 2.5.

Não pode ser adequado para:

[Respiradores](#) não produz oxigênio, não em ambiente deficiente em oxigênio.

lembre-se: só pode ser usado para poluentes, o uso errado vai levar a doenças ou até a morte.



Etapas para uso

passo 1

Abra o [mascarar](#), o clipe do nariz para fora. Ambas as mãos foram puxadas para o lado da banda, de modo que a pasta do nariz acima da máscara.

passo 2

Coloque a máscara contra o queixo.

etapa 3

Puxe a faixa para o ouvido.

Passo 4

Coloque as mãos no meio do clipe de nariz de metal. A partir do meio do nariz pelo status quo, até perto da ponte do nariz.

passo 5

Na área de trabalho, Sinta o vazamento de ar do nariz, deve ser re-ajustar o clipe nasal. Se você sentir nenhum excesso de ar pode entrar na área de trabalho.

