

Conteúdo do produto:

- 1 [Termômetro](#)
- 1 manual do proprietário
- 1 BBT Cover
- 1 caso de armazenamento
- 1 giftbox
- 5 tampas de sonda



conteúdo do produto

Termômetro eletrônico médico 1

Após o período menstrual começar a ser testado, o [termômetro](#) foi colocado debaixo da língua todas as manhãs depois de acordar, e o tempo foi calculado depois de ouvir a campainha. Retire a leitura após 3 minutos

especificação do produto

Registre o uso, métodos de limpeza e precauções do produto; O registro de temperatura pode ser usado para medir a temperatura dos dados após cada uso.

caixa de armazenamento

Após o uso do produto, limpe o termômetro com água limpa ou álcool e guarde-o na caixa de recepção.

The basal body temperature of ovulation

Cannot ignore temperature changes



washable
The thermometer
probe is washable

High-Precision
Exactly two
decimal places

high quality
High sensitive
resistance temperature
measurement

superioridade do produto

Display numérico de alta precisão

□Prepare para 2 casas decimais e mostre uma temperatura mais precisa□

Exibição de tela grande + função de memória

(Registrar os dados da última medição de tempo, conveniente antes e depois da comparação)

Materiais saudáveis e ecológicos

(O material do material antibacteriano, a área de medição de temperatura pode ser lavada, mais higiênico)

Medição de temperatura do termistor de alta sensibilidade

(Tecnologia avançada de detecção de temperatura, medição rápida de temperatura)

Abelha humanizada Ming solicita [medição de temperatura](#)

(A campanha solicita uma leitura de 3 minutos para garantir que os dados de medição sejam mais precisos)