


Características:

Engenharia de corpo humano 3D Design estéreo

Tecido não tecido multicamado e Meltblown, total 4 camadas

Forma da preensão da correia de alumínio

4 layers protection

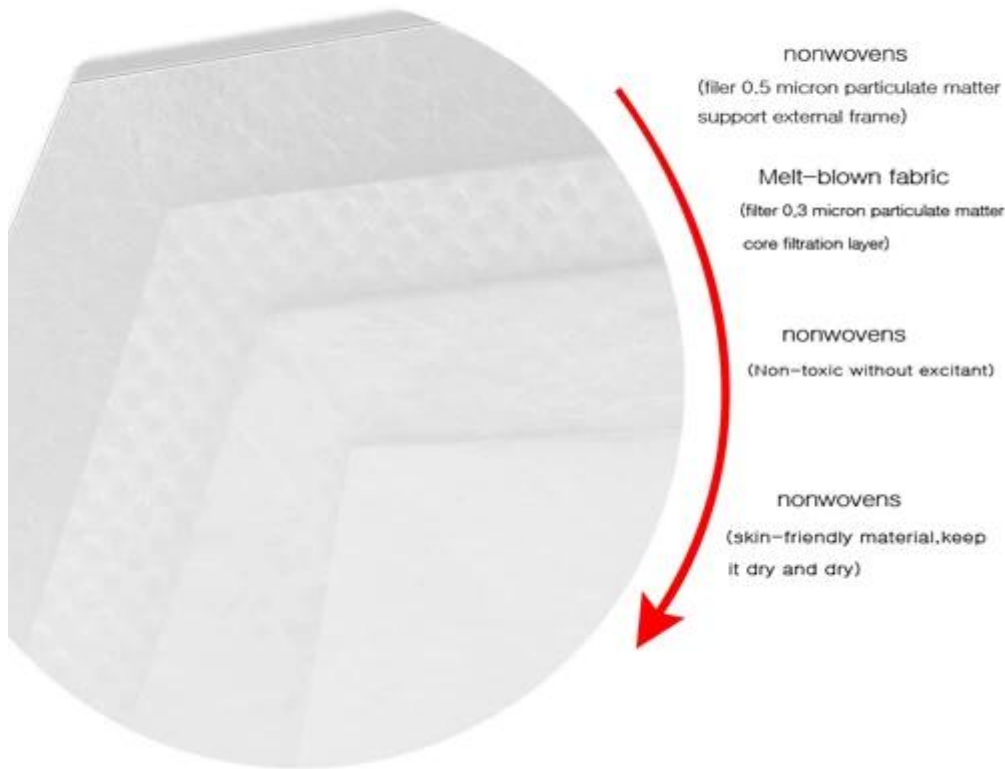

Etapas para o uso

etapa 1

Abra a máscara, grampo de nariz para fora. Ambas as mãos foram puxadas lado da banda, de modo que a pasta do nariz acima da máscara.

Passo 2

Coloque a máscara contra o queixo.

Passo 3

Puxe a banda para a orelha.

etapa 4

Coloque as mãos no meio do clipe do nariz metálico. A partir do meio do nariz pelo status quo, até perto da ponte do nariz.

etapa 5

Na área de trabalho, sentir o vazamento de ar do nariz, deve ser re-ajustar o clipe do nariz. Se você sentir que nenhum estouro de ar pode entrar na área de trabalho.



Intervalo de utilização

pode ser usado para proteger as partículas não oleosas, reduzir o odor de alguns compostos orgânicos.
Partículas não oleosas: poeira (Propriedade mineral, poeira metálica da fibra da poeira) pólen e névoa

Que pode ser usado para proteger o ambiente de poluição do ar fina partícula PM 2,5

Não pode ser apropriado para:

Respiradores não produzem oxigênio, não em ambiente deficiente de oxigênio

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions

