Medexpro fornece a qualidade superior <u>máscaras</u> que pode ser impressa <u>logotipo</u>. Se você está interessado, o inquérito dos pls mim.

Nossas máscaras são todo o projeto 3D e há seis tipos.



## Itens de clientes

O produto personalizado em si pertence à particularidade. Depois de confirmar a amostra personalizada, o produto não pode ser alterado. Sugere-se que confirme as informações com o serviço ao cliente antes da produção.



## Etapas para uso

## Passo 1

Abra a máscara, corte o nariz. Ambas as mãos foram puxadas lado da banda, de modo que a pasta do nariz acima da máscara.

Passo 2

Coloque a máscara contra o queixo.

Passo 3

Puxe a banda para a orelha.

Passo 4

Coloque as mãos no meio do grampo do nariz metálico. Do meio do nariz pelo status quo, até perto da ponte do nariz. Passo 5

Na área de trabalho, sentir o vazamento de ar do nariz, deve ser re-ajustar o grampo do nariz. Se você não sentir nenhum estouro de ar pode entrar na área de trabalho.









