

Anti poluição máscara de cabeça vt102 máscara de poeira respirador.


- O projeto original da forma permite o baixo perfil e o bom ajuste
- Conforto melhorado devido à ponte de nariz facilmente ajustável
- Máscara de alta densidade e degradação para o PM 2.5



Principais características

- O projeto original da forma permite o baixo perfil e o bom ajuste
- Conforto melhorado devido à ponte de nariz facilmente ajustável
- Extra tira de espuma Lisa dentro da máscara
- Fácil de respirar por causa de mídia de filtro robusto
- Para o ambiente da poeira e da névoa
- Mídia de microfibra profissional
- Material de alta degradação

4 layers protection

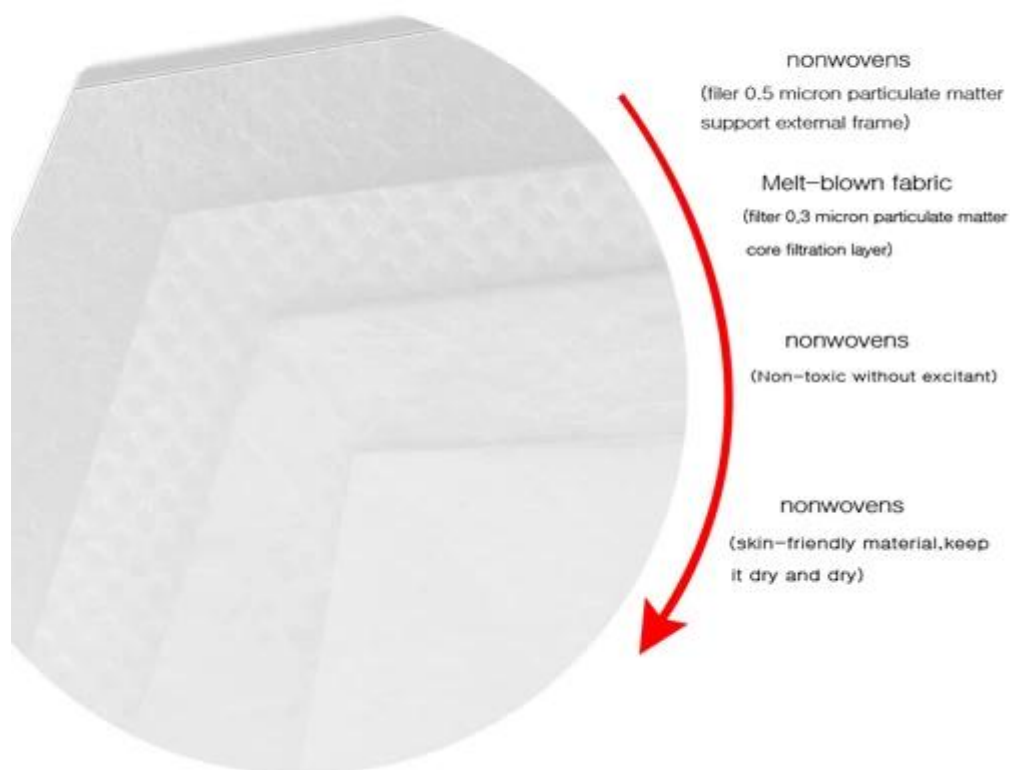

Etapas para o uso

Etapa 1: selecione o tamanho correto do respirador que você estava equipado.

Passo 2: Coloque a palma através dos laços de seu respirador e copo-lo sobre seu rosto.

Passo 3: Posicione o respirador para cobrir o nariz e o queixo.

Etapa 4: com uma mão segurando o respirador, use a outra mão para colocar a primeira cinta na coroa da cabeça (acima das orelhas), em seguida, coloque a segunda cinta na parte de trás do pescoço.

Passo 5: usando dois dedos de ambas as mãos, pressione a peça metálica de acordo com o contorno da sua ponte de nariz. (nunca belisque a peça de metal!)

Passo 6: com ambas as mãos sobre o respirador, expire fortemente para verificar se há vazamento em torno dele.

Passo 7: vazamento é evidente quando o cabelo se move durante o forte exalar. Se usar óculos, embaçamento dos vidros indica vazamento.

Passo 8: se o vazamento de ar for notado, ajuste o respirador, as correias e a parte do nariz antes de testar novamente.

