

Здоровый респиратор безопасности [Маски](#) Пыльцы пыльцы аллергенов гриппа  
микробы масок




Особенности:

3D-дизайн для человеческого тела

Многослойный нетканый материал и выдутый из расплава, всего 4 слоя

Форма крепления алюминиевого пояса

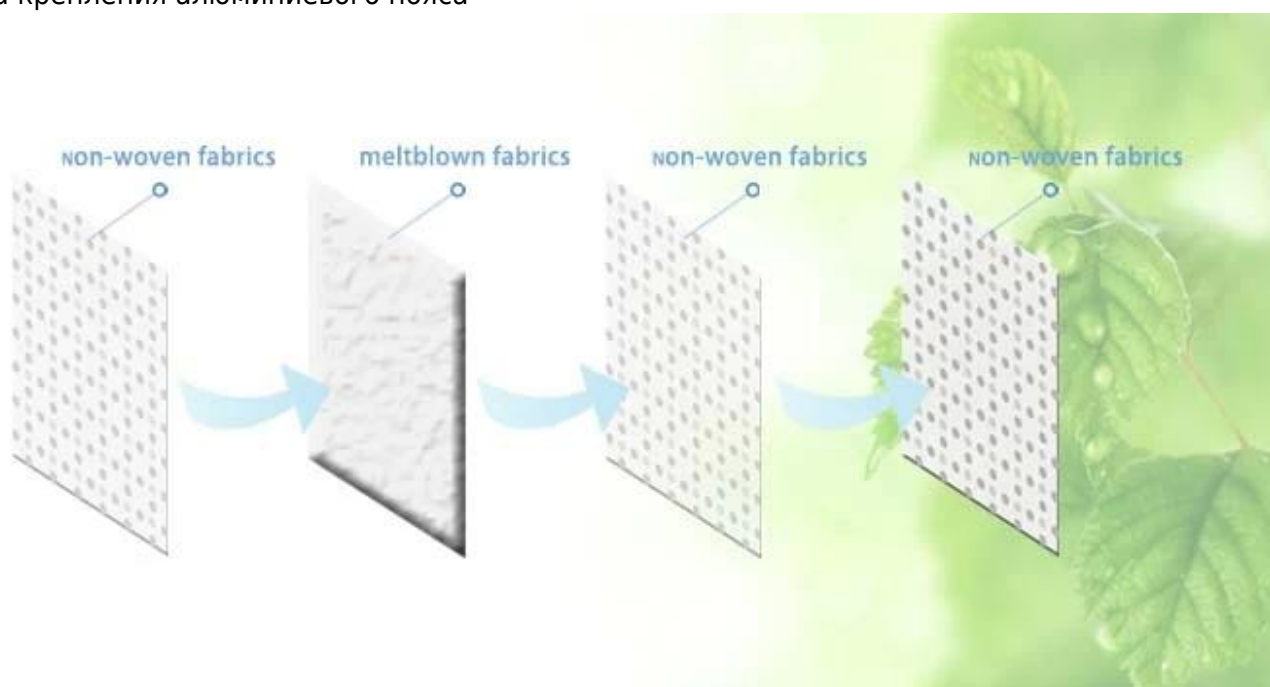

## Применимый объем

могут быть использованы для защиты немасляных частиц, уменьшают запах некоторых органических соединений.

Непрозрачные частицы: пыль (минеральные свойства, пыльцы из пыльцевого пыльца) пыльца и дымка.

Который может использоваться для защиты окружающей среды от загрязнения тонкодисперсных частиц РМ 2.5.

Не подходит для:

[Респираторы](#) не производят кислород, а не в кислородно-дефицитной среде.

помните: можно использовать только для загрязняющих веществ, неправильное использование приведет к болезни или даже смерти.



Шаги для использования

шаг 1

Открой [маскировать](#), зажим носа. Оба руки были вытащены стороной группы, так что папка с носом над маской.

шаг 2

Положите маску на подбородок.

шаг 3

Потяните ленту за ухо.

шаг 4

Поместите руки в середину металлического носового клипа. От середины носа по статус-кво, до самого конца носа.

шаг 5

В рабочую зону, почувствуйте утечку воздуха из носа, следует отрегулировать зажим для носа.

Если вы не чувствуете, что переполнение воздуха не может войти в рабочую зону.

