

Медекспро обеспечивает высокое качество [маски](#) которые могут быть напечатаны **ЛОГОТИП**.
Если вы заинтересованы, PLS дознание меня.

Наши маски все 3D дизайн и есть шесть видов.



Товары для клиентов

Пользовательский продукт сам по себе относится к определенности. После подтверждения настроенного образца, продукт не может быть изменен. Перед производством предлагается подтвердить информацию в службе поддержки клиентов.

The filtration effect of non oil particulate matter was at least 96.7%

customizable



Custom items

The custom product itself belongs to the particularity. After confirming the customized sample, the product cannot be changed. It is suggested to confirm the information with the customer service before production.

Шаги для использования

Шаг 1

Открыть маску, нос клип из. Обе руки были вытягиваны стороной полосы, так НОП скоросшиватель носа над маской.

Шаг 2

Положите маску против подбородка.

Шаг 3

Потяните полосу к уху.

Шаг 4

Положите руки в середине металлический зажим носа. С середины носа по статус-кво, до близкого к мосту носа.

Шаг 5

В рабочей области, почувствовать утечку воздуха из носа, должны быть повторно настроить нос клипа. Если вы чувствуете, не переполнение воздуха может войти в рабочую зону.

