

Полутион маски головки vt102 с респираторной маской.


- Уникальная конструкция формы позволяет проделать недостаточное профиле и хорошую посадки.
- Повышение удобства в связи с легко регулируемым мостом носа
- Высокой плотности и высокой степени деградации для TЧ2, 5



Основные функции

- Уникальная конструкция формы позволяет проделать недостаточное профиле и хорошую посадки.
- Повышение удобства в связи с легко регулируемым мостом носа
- Более гладкая пенопластовая полоса внутри маски
- Простота дыхания благодаря надежному носителю фильтров
- Для среды пыли и тумана
- Профессиональный микроволоконный носитель
- Материал высокого качества

# 4 layers protection

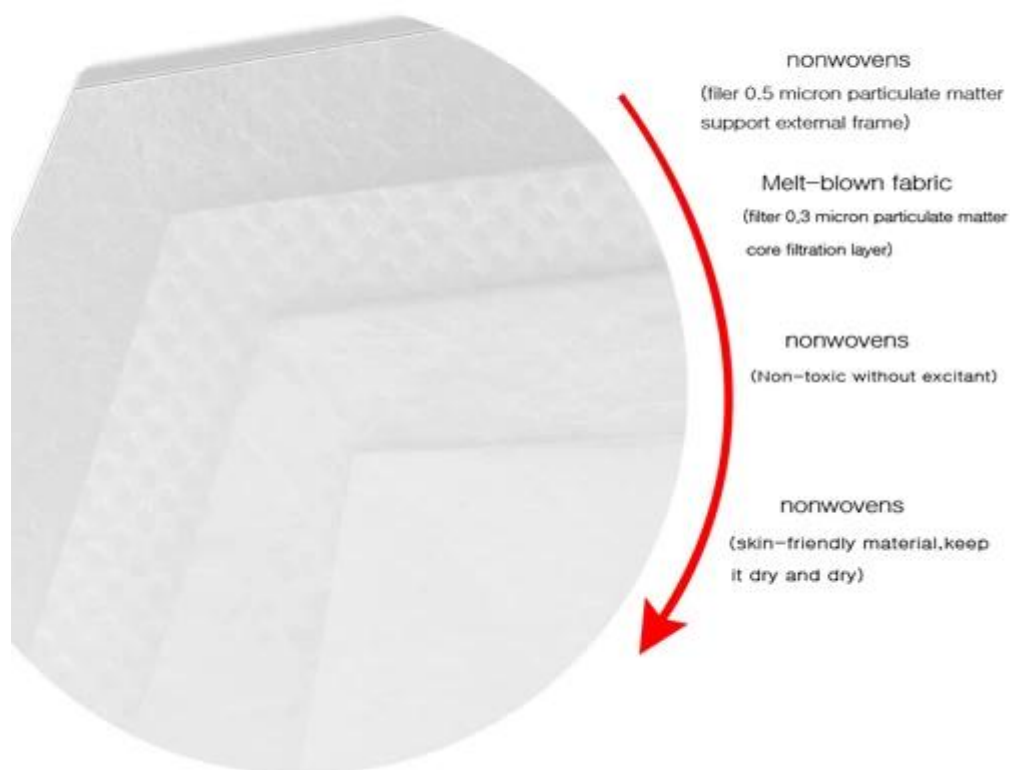

## Действия по использованию

Шаг 1: выберите правильный размер респираторного аппарата.

Шаг 2: Поместите ладонь через петли респиратора и выпейте по вашему лицу.

Шаг 3: Поместите респиратор, чтобы покрыть нос и подбородок.

Шаг 4: с одной рукой, держащей респиратор, используйте другую руку для размещения первой лямки на гребне головы (над ушами), а затем поместите вторую лямку на спину шеи.

Шаг 5: используя два пальца обеих рук, нажимайте металлическую деталь в соответствии с контуром моста носа. (никогда не зажмите металлическую деталь!)

Шаг 6: с помощью обеих рук в аппарате респираторного дыхания твердо выдохните, чтобы проверить наличие утечки вокруг него.

Шаг 7: утечка очевидно, когда ваши волосы перемещаются во время сильного выдохнуть. Если надеть очки, то туманность очков указывает на утечку.

Шаг 8: Если отмечается утечка воздуха, то перед повторным испытанием Отрегулируйте респиратор, ремни и кусок носа.

