

Medexpro предоставляет маски верхнего качества, которые можно распечатать [ЛОГОТИП](#). If вы заинтересованы, pls дознание меня.

наш [маски](#) все 3D-дизайн и есть шесть видов.




Профессиональный производитель [маскировать](#) с достаточным запасом.

Клиенты

Собственный продукт сам по себе относится к специфике. После подтверждения настроенного образца продукт нельзя изменить. Рекомендуется доверить информацию с обслуживанием

клиента перед производством.

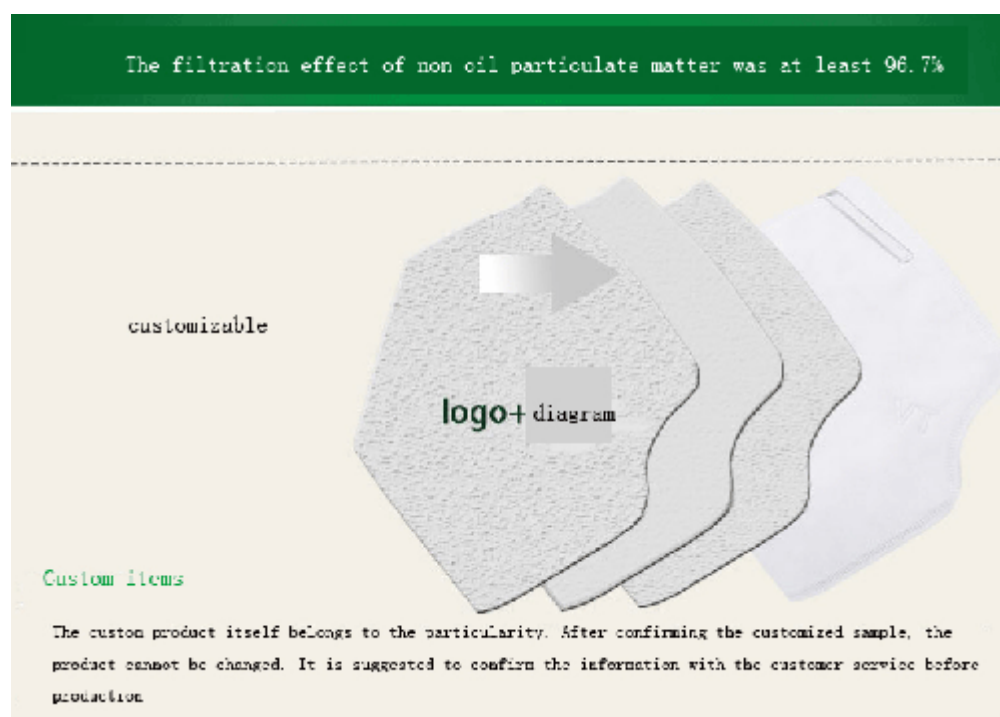

Шаги для использования

шаг 1

Открой [маскировать](#), зажим носа. Оба руки были вытащены стороной группы, так что папка с носом над маской.

шаг 2

Положите маску на подбородок.

шаг 3

Потяните ленту за ухо.

шаг 4

Поместите руки в середину металлического носового клипа. От середины носа по статус-кво, до самого конца носа.

шаг 5

В рабочую зону, почувствуйте утечку воздуха из носа, следует отрегулировать зажим для носа. Если вы не чувствуете, что переполнение воздуха не может войти в рабочую зону.

