

Anti kirlilik kafa maskesi vt102 toz maskesi solunum cihazı.


- Benzersiz şekil tasarımı düşük profil ve iyi uyum sağlar
- Kolay ayarlanabilen burun köprüsü sayesinde geliştirilmiş rahatlık
- Yüksek yoğunluk ve yüksek bozulma maskesi PM 2.5 için



Temel Özellikler

- Benzersiz şekil tasarımı düşük profil ve iyi uyum sağlar
- Kolay ayarlanabilen burun köprüsü sayesinde geliştirilmiş rahatlık
- Maske içinde ekstra pürüzsüz köpük şerit
- Güçlü filtre ortamı sayesinde nefes almak kolay
- Toz ve sis çevresi için
- Profesyonel mikrofiber medya
- Yüksek bozulma malzemesi

4 layers protection

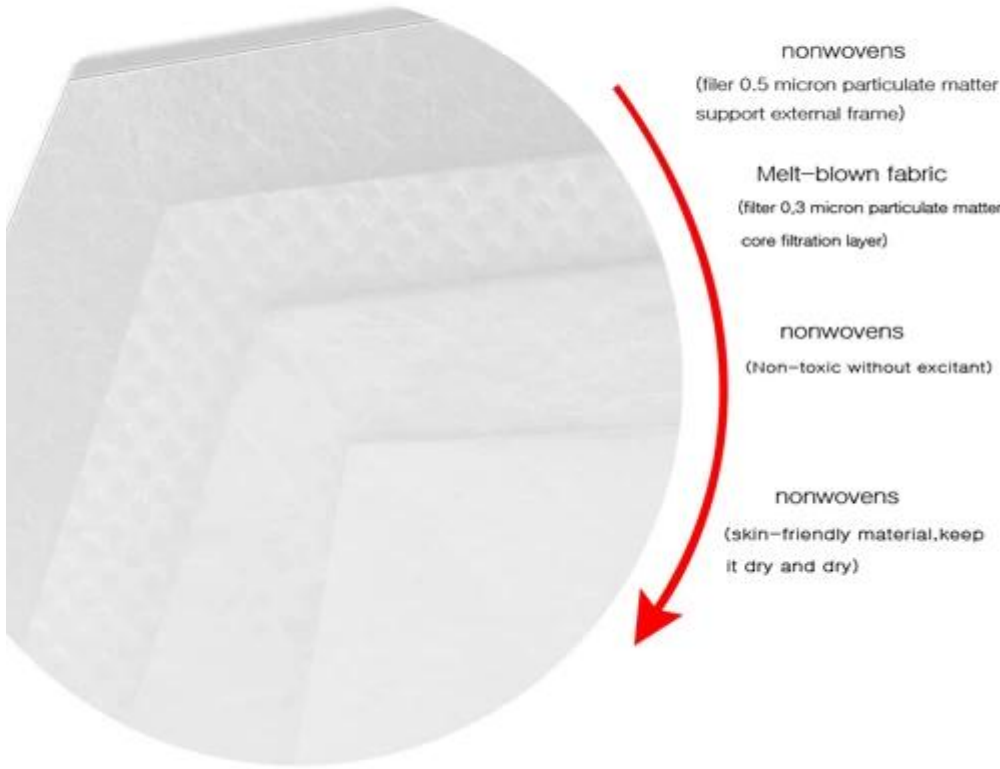

Kullanım adımları

1. Adım: uygun olan doğru solunum cihazı boyutunu seçin.

Adım 2: yüzünüzün üzerinde sizin solunum döngüsü ve fincan üzerinden avuç yerleştirin.

Adım 3: burun ve çene kapsayacak şekilde solunum cihazı konumlandırın.

Adım 4: bir el solunum cihazı tutarak, diğer taraftan baş taç (kulakların üstündeki) üzerine ilk kayışı yerleştirin, daha sonra boynunun arkasına ikinci kayış yerleştirin.

Adım 5: İki elin iki parmak kullanarak, burun köprüsü kontur göre metal parça aşağı basın. (asla metal parça çimdik!)

Adım 6: her iki eliyle solunum üzerinde, etrafında sızıntı kontrol etmek için güçlü nefes.

Adım 7: kaçak saç güçlü nefes sırasında hareket ettiğinde açıktır. Gözlükleri takarken, camların Fogging sızıntıyı gösterir.

8. Adım: hava sızıntısı belirtilirse, solunum, kayışlar ve burun parçasını tekrar test etmeden önce ayarlayın.



